

### نکات مهم در استفاده از چراغ مادون قرمز

#### طریقه روشن کردن :

1. پس از نصب دوشاخه به پریز ارت دار و کلید قرمز دستگاه را روشن کنید. پس از کلمه HELO (با یک L) ساعت 12:00 نمایش داده می شود که نیازی به تنظیم آن نیست در این مرحله دستورالعمل شماره 2 را اجرا نمایید.
2. کلید تایمر را لمس کرده و زمان را با کلید + / - تنظیم کنید دیگر نیاز به کاری ندارید پس از ۱۰ ثانیه چراغ روشن می شود و فقط باید دایمر را هم روشن و تنظیم نمایید.
3. آخرین تنظیمات شما ذخیره می شود هر بار که دستگاه را روشن کنید پس از رویت ساعت 12:00 کفایت فقط دکمه تایمر را بزنید و نیازی به تنظیم مجدد زمان ندارید.
4. توجه کنید که در هنگام تنظیم دو رقم سمت راست دقیقه را نشان میدهد و دو رقم سمت چپ ساعت را نشان می دهد با توجه به مورد فوق دقت کنید اعداد سمت چپ صفر باشد .  
تذکر مهم : هنگام شمارش معکوس دو عدد سمت راست ثانیه را نشان می دهد و دو رقم سمت چپ دقیقه را نشان می دهد .
5. حتما دایمر را در حد لازم تنظیم کنید چون امکان خاموش کردن با دایمر نیز وجود دارد.  
لطفا موارد زیر را در استفاده از چراغ مادون قرمز جدا رعایت فرمایید:

1. لامپ را با نیروی زیاد روی سرپیچ سفت نکنید ممکن است انتهای لامپ بشکند.
2. از یک سیم رابط بلند استفاده کنید تا سیم چراغ کشیده نشود.
3. در تنظیم زاویه و ارتفاع تابش از سفتی پیچ های مفاصل تنظیمی اطمینان حاصل نمایید . \*\*
4. در مدل جنرال نسبت به استفاده از چراغ ، باید به فواصل زمانی مناسب یک ریگلاژ پیچ های مفصلی انجام شود.
5. حتما پیچ های محافظ توری را تا آخر ببندید .
6. هنگام روشن بودن چراغ از تکان های شدید چراغ خوداری نمایید ممکن است لامپ بسوزد.
7. برای تنظیم تابش از دسته مخصوص استفاده نمایید کلاهدک شدیداً داغ می باشد.
8. از تراوش مایعات روی لامپ جلوگیری نمایید چون ممکن است لامپ بسوزد.
9. در صورتیکه احساس میکنید گرمای لامپ کافی نیست با اهمتر برق ساختمان را بررسی کنید. در مکان های که از مرکز دور باشند برق ضعیف تر خواهد بود و در نتیجه المنت لامپ به حد کافی گرما تولید نخواهد نمود.
10. برای تمیز کاری وقتی دستگاه سرد است از دستمال مرطوب و خشک استفاده نمایید و هرگز آب به قسمت های برقی نزنید. لامپ های مادون قرمز شامل هیچ گونه گارانتی نمیباشد.
11. روغن کاری پیچ های تنظیمی عمر آنها را افزایش می دهد.
12. فیوز دستگاه ده ۱۰ آمپر می باشد یک عدد اضافی هم به تنه دستگاه چسبانده شده است.
13. از لمس کردن کلیدهای + و - به صورت متوالی خودداری نموده و تک تک اقدام به افزایش و کاهش تایم بنمایید.

باسپاس فراوان